

Korrekte Probenentnahme zur Kontrolle der Endoskopaufarbeitung

Wir empfehlen, in Anlehnung an die Humanmedizin, die Kontrolle der Endoskop-aufarbeitung viertel- bis halbjährig durchzuführen, um rechtzeitig sich entwickelnde Hygieneprobleme aufzudecken, noch bevor tatsächlich Infektionen auftreten. Stichprobenartig werden flexible Endoskope nach erfolgter Reinigung und Desinfektion untersucht.

Zwei Arten von Untersuchung werden durchgeführt:

1. **Abklatschproben** von Endoskopstellen, die der Reinigung und Desinfektion nur schwer zugänglich sind (Endoskopdistale)
2. **Spülproben** von den Endoskopkanälen (Instrumentierkanal, Luft-Wasser-Kanal)

Durchführung der Abklatschproben

1. Alle Arbeiten mit Einmalhandschuhen durchführen
2. Endoskop wie üblich reinigen und desinfizieren
3. Abklatschplatten genau beschriften (Lokalisation, Datum)
4. Deckel der entsprechenden Abklatschplatte abnehmen
5. Den Krümmungsabschnitt des Instrumentierschlauches auf der Agaroberfläche der 1. Abklatschplatte abrollen. Deckel der Abklatschplatte wieder auflegen. Entsprechend mit dem distalen Ende des Instrumentierschlauchesverfahren (Mehrere Male auf der Agaroberfläche der 2. Abklatschplatte abdrücken). Deckel der Abklatschplatte wieder auflegen
6. Abklatschplatten mit formlosem Begleitschreiben (Praxisname, Entnahmeort, Entnahmedatum) an LABOKLIN zurückschicken
7. Das Ergebnis folgt ca. 5 Tage nach Eingang der Abklatschplatten im Labor

(WICHTIG: Haltbarkeit der Agarplatten beachten! Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums Agarplatten nicht mehr anwenden! Haltbarkeitsdatum auf Agarplattendeckel aufgedruckt!)

Durchführung der Spülproben

1. Alle Arbeiten mit Einmalhandschuhen durchführen
2. Endoskop wie üblich reinigen und desinfizieren
3. 2 sterile Gefäße mit Schraubverschluß genau beschriften (Lokalisation, Datum)
4. Instrumentierkanal mit 20ml steriler 0,9%iger NaCl-Lösung Spritze durchspritzen; Flüssigkeit im ersten Gefäß auffangen
5. Luft-Wasserkanal mit 20ml steriler 0,9%iger NaCl-Lösung Spritze durchspritzen; Flüssigkeit im zweiten sterilen Gefäß mit Schraubverschluß auffangen
6. Beide Gefäße mit formlosem Begleitschreiben innerhalb von 24 Stunden gekühlt an Laboklin zurück schicken
7. Das Ergebnis folgt ca. 5 Tage nach Eingang der Probe im Labor

Die Abklatschplatten und die sterilen Schraubgefäße sind bei LABOKLIN erhältlich.